



ÖZEL GÖZLEM TIP
LABORATUVARI

NUMUNE RED KRİTERLERİ TALİMATI

1. AMAÇ:

Laboratuvarda çalışılan testlerden doğru sonuç elde edilmesini sağlamak için gerekli tüm şartlar hakkında Laboratuvar çalışanlarını ve numune alımında görevli tüm laboratuvar çalışanlarına konu hakkında bilgilendirilmesini sağlamak.

2. KAPSAM:

Laboratuvarımızda çalışılacak veya dış laboratuvar gönderilecek olan numuneleri kapsamaktadır

3. TANIMLAR:

4. KISALTMALAR:

5. SORUMLULAR:

Laboratuvar çalışanları ve diğer sağlık çalışanları

6. TALİMAT DETAYLARI:

- Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü yapılmaz.
- İstemi yapılmamış numuneler laboratuvara kabul edilmez.
- Uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez.
- Hemolizli numuneler Laboratuvara kabul edilmez.
- Lipemik numuneler geldiğinde LBYS'in açıklama kısmında belirtilir.
- Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa, altında isim olup olmadığı kontrol edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır.
- Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez.
- Pıhtılı numuneler kabul edilmez.
- Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.
- Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul edilmez (30 dakikadan fazla beklemiş idrar ve gaita)
- Kan, BOS ve idrar dışında kalan steril vücut sıvılarına ait aynı tarihli örnekler kabul edilmez.
- Uygunsuz numune (kırık, açık veya steril olmayan kaplar ile gelmiş numune, başka örnek ile kontamine numune, formalinde gelmiş numune) kabul edilmez.



ÖZEL GÖZLEM TIP
LABORATUVARI

NUMUNE RED KRİTERLERİ TALİMATI

- Bir başka materyalle kontamine örnekler (idrarın dışkı ile karışmış olması gibi) reddedilir.
- Formalin içindeki örnekler laboratuvara kabul edilmez.

HORMON CİHAZI TESTLERİ

- HEMOLİZLİ NUMUNELER,
- AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
- AŞIRI İKTERİK SERUMLAR,
- BARKODSUZ ÖRNEKLER
- YETERSİZ NUMUNELER REDDEDİLİR, ÇALIŞILMAZ.
- NUMUNE ÖRNEĞİ AÇKEN ALINMASI GEREKTİĞİ HALDE, HASTANIN TOK OLMASI,
- HASTANIN NUMUNE ALINMASI İÇİN BELİRLENEN ZAMAN / SÜRE'YE UYMAMASI.
- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR.

KOAGÜLASYON TESTLERİ

- PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,
- TÜPLERİN ÜZERİNDE BELİRTİLEN İŞARETE UYULMAYARAK EKSİK YA DA FAZLA KAN ALINMASI,
- ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN TÜPLERE KAN ALINMIŞ OLMASI DURUMUNDA ÖRNEKLER REDDEDİLİR, ÇALIŞILMAZ.
- BARKODSUZ ÖRNEKLER,
- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR.

COOMBS TESTLERİ

- HEMOLİZLİ NUMUNELER,
- AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
- AŞIRI İKTERİK SERUMLAR.
- BARKODSUZ ÖRNEKLER,
- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR

HEMOGRAM

- PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,
- NUMUNE TÜPÜNDE KANIN GEREĞİNDEN AZ VEYA ÇOK OLMASI.
- BARKODSUZ ÖRNEKLER,

SEDİMENTASYON

- PIHTILAŞMIŞ ÖRNEKLER,



ÖZEL GÖZLEM TIP
LABORATUVARI

NUMUNE RED KRİTERLERİ TALİMATI

- HEMOLİZLİ NUMUNELER,
- AŞIRI LİPEMİK SERUMLAR,
- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR,
- NUMUNE TÛPÜNDE SERUM GEREĞİNDEN AZ VEYA ÇOK OLMASI.
- BARKODSUZ ÖRNEKLER

SPERMİOGRAM

- NUMUNE İÇİNE SU, SABUN VS. KARIŞMASI,
- NUMUNENİN BİR KISMININ KAP İÇİNE ALINAMAMASI,
- BARKODSUZ ÖRNEKLER,
- CİNSEL PERHİZ YAPILMAMIŞ OLMASI,
- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR

GAİTA TETKİKİ

- NUMUNE TRANSFER SÜRELERİ GEÇMİŞ NUMUNELER REDDEDİLİR.
- BARKODSUZ ÖRNEKLER,
- YETERSİZ NUMUNELER REDDEDİLİR, ÇALIŞILMAZ.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR